



# IPI Käyttöohjeet

## Suomi



## IPI Safety Cap käyttöohje

*IPI Safety Cap on tarkoitettu nestemäisen lääkejätteen tyhjennykseen turvallisesti. Tuote soveltuu käytettäväksi 0,5–10 L HD-Polyeteeniastioiden kanssa. Aktiivihilisuodatin estää haitallisten aerosolien pääsyn säiliöstä huoneilmaan. Tämä estää herkistymisen päänsärylle ja huonovointisuudelle, jota työnsuorittajilla voi esiintyä.*

*Ruiskuliittimeen sopivat Luer ja Luer Lock -liittimillä varustetut ruiskut sekä infuusioletkut. Myös esim. lääkelisätyt infuusiot voi tyhjentää suoraan IPI Safety Cap -korkin kautta astiaan.*

*Aktiivihilisuodattimen suodatuskyky, käyttäen toluenia, oli erinomainen VTT:n 4/2022 suorittamassa testissä.*

## IPI Safety Cap -korkkien käyttö

1. Kieritä korkki paikalleen tiukasti jätteastiaan
2. Käännä aktiivihilisuodatin alaspäin astian suuntaisesti alaspäin, jotta astian tasapaino paranee

## Ruiskun tyhjennys

1. Astia on tuettava hyvin kaatumisen estämiseksi, tällöin voit tyhjentää ruiskun yhtä kättä käyttäen
2. Liitä lääkeruisku / infuusioletku Q-Syte venttiiliin
3. Tyhjennä ruisku astiaan painamalla mäntä pohjaan normaalisti
4. Irrota tyhjä lääkeruisku / infuusioletku

## Täyttyneen jätteastian vaihto

1. Astia pitää vaihtaa kun se on täyttynyt 90%:sti (**Laki** vaarallisten aineiden kuljetuksesta)
2. Kierrä IPI Safety Cap turvakorkki irti pullosta / astiasta
3. Kierrä tilalle astian alkuperäinen sinettikorkki tiukasti kiinni
4. Kierrä IPI Safety Cap turvakorkkikorkki uuteen tyhjäan astiaan
5. Merkitse uusi astia asiaankuuluvasti ennen kun alat kerätä sinne jätteitä
6. Toimita täyttynyt astia keräysastiaan, tai keräyspisteeseen

## Varaosat ja vuosihuolto

Aktiivihilisuodatin(tuotekoodit: 614 / 601) tulee vaihtaa kerran vuodessa. Aktiivihilisuodatin tulee vaihtaa myös, jos sen sisälle pääsee nestettä esimerkiksi ylitäytön tai astian kaatumisen seurauksena. Käytetyt aktiivihilisuodattimet laitetaan kiinteän lääkejätteen keräilyastiaan. Vaihda Q-Syte venttiilitulppa tarvittaessa.





## IPI Triang -jätesäiliö

*IPI Triang -jätesäiliö on kätevä tapa pakata nestemäiset ja kiinteät lääkejätteet säädöksiä noudattaen ja tilaa säästäen. IPI Triang -jätesäiliön kekseliäs kolmiomuoto mahdollistaa säiliöiden pakkaamisen 80–100 litran kartonkitynnyniin, jonka halkaisija on noin 45 cm. Säiliötä mahtuu tynnyriin kolme rinnakkain kolmeen kerrokseen, eli 9 kpl.*

*Jätesäiliöt valmistetaan Suomessa HD-Polyeteenistä.*

Tuotenumero	500
Jätelaji	Lääkejäte
Materiaali	HD-Polyeteeni
Tilavuus	9 L
Ulkomitat	337 x 256 x 215
Väri	Läpinäkyvä



[Klikkaa tästä katsoaksesi suodattimen vaihtovideo](#)

*Aktiivihiiisuodattimella varustettu ruiskuntyhjennuskorkki IPI Safety Cap mahdollistaa lääkejätteen turvallisen pakkaamisen lääkeruiskusta sekä infusioista suoraan astiaan.*