



IPI Anvisningar

Svenska



IPI safety cap bruksanvisning

IPI Safety Cap är avsedd för en säker tömning av medicinskt vätskeavfall. Produkten kan användas med HD-Polyetenkärl 0,5–10 L. Aktivkolfiltret förhindrar skadliga aerosoler från att tränga in ur behållaren i rumsluften. Detta förhindrar sensibilisering för huvudvärk och illamående som kan uppkomma hos användaren.

Sprutor försedda med Luer och Luer Lock-koppling som passar till sprutkopplingen och infusions slangar. Även t.ex. infusioner fyllda med läkemedel kan tömmas direkt via IPI Safety Cap-korken i kärlet.

Aktivkolfiltret testades, med användning av toluen, av VTT 4/2022 och resultatet var synnerligen gott.

Användning av IPI safety cap-korkar

1. Skruva fast korken ordentligt på avfallskärlet
2. Vänd aktivkolfiltret nedåt i riktning med kärlet så att balansen förbättras

Tömning av sprutan

1. Stöd kärlet väl för att förhindra att det välter, då kan du tömma sprutan med en hand
2. Fäst medicinsprutan / infusionslangen i Q-Syte-ventilen
3. Töm sprutan i kärlet genom att trycka kolven i botten normalt
4. Lösgör den tomma medicinsprutan / infusionslangen

Byte av avfallskärl som är fullt

1. Kärlet ska bytas när det har fyllts till 90 procent (lagen om transport av farliga ämnen)
2. Skruva IPI Safety Cap-säkerhetskorken av flaskan / kärlet
3. Skruva i stället fast den ursprungliga sinettkorken ordentligt
4. Skruva IPI Safety Cap-säkerhetskorken på ett nytt tomt kärl
5. Märk det nya kärlet enligt anvisningarna innan du börjar samla upp avfall i det
6. Lämna in det fyllda kärlet till uppsamlingsbehållaren eller på uppsamlingspunkten

Reservdelar och årsservice

Aktivkolfilter (produktkoder: 614 / 601) ska bytas ut en gång per år. Aktivkolfiltret ska också bytas ut om det kommer in vätska i det till exempel på grund av överfyllning eller om kärlet välter. Använda aktivkolfilter placeras i uppsamlingsbehållaren för fast medicinskt avfall. Byt Q-Syte-ventiltapp vid behov.



[Klicka här för att se videon om hur du byter filter](#)



IPI Triang -avfallsbehållare

IPI Triang -avfallsbehållaren är ett behändigt sätt att packa medicinskt vätskeavfall och fast medicinskt avfall. Så att du följer bestämmelser och sparar plats. IPI Triang -avfallsbehållaren har en påhittig triangelform som tillåter förpackning i 80–100 liters kartongtunnor med en diameter på cirka 45 cm. Tre behållare får plats bredvid varandra i tre lager, det vill säga 9 stycken.

Avfallsbehållarna tillverkas i Finland av HD-Polyeten.

Artikelnummer	500
Avfallslag	Medicinskt avfall
Material	HD-Polyeten
Volym	9 L
Yttre mått	337 x 256 x 215
Väri	Transparent



[Klicka här för att se videon om hur du byter filter](#)

Spruttömningskorken IPI Safety Cap försedd med aktivkolfilter möjliggör en säker förpackning direkt ur läkemedelssprutan i kärlet.